

ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ

ОЧНІ КРАПЛІ

2% Ектоїн

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

СКЛАД

Ектоїн, гідроксиетилцелюлоза, натрію хлорид, вода, цитратний буфер.
БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ

ВЛАСТИВОСТІ ЕКТОЇНУ:

ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ, краплі очні, містить Ектоїн, природну клітинно-захисну молекулу, отриману з мікроорганізмів, стійких до екстремальних умов, яка здатна зменшувати вираженість запалення та має мембраностабілізуючі властивості. Ектоїн забезпечує стабільність клітинної мембрани, підвищуючи гідрофільність ліпідних компонентів, пов'язує зовнішній ліпідний з внутрішнім водним шаром, має протизапальний ефект.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ізотонічні очні краплі ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ — це медичний виріб, який застосовується для запобігання та зменшення симптомів алергічного кон'юнктивіту, а саме:

- для захисту від впливу алергенів
- для запобігання та зменшення симптомів алергії (запалення, почервоніння, подразнення, надмірна сльозотеча, свербіж, печіння в очах)
- для прискорення **процеса** регенерації подразненої та чутливої кон'юнктиви
- для осіб, що носять контактні лінзи, дітей та людей з чутливими очима.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завжди застосовуйте ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ згідно з цими інструкціями. Перш ніж застосовувати виріб, якщо Ви не впевнені, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом. Краплі можна застосовувати декілька разів на добу за потребою. Закапайте 1-2 краплі в око та покляпайте декілька разів, щоб рівномірно розподілити розчин по поверхні ока.

За необхідності ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ можна застосовувати декілька разів на годину.

Перед першим застосуванням флакон потрібно активувати. Для цього декілька разів натисніть на дозувальне кільце, тримаючи флакон дотори дном.



- Краплі можуть застосовуватись двома шляхами:**
1. Зніміть захисний ковпачок з помпи. Будьте обережні, щоб не торкатися ніжного наконечником.
 2. Візьміть помпу рукою, як показано на рис. 2.
 3. Переверніть флакон дотори дном й активуйте помпу, поки не з'явиться перша крапля. Не обрізайте наконечник.
 4. Тримайте флакон дотори дном і, натискаючи помпу, закапайте в око призначену кількість крапель. Уникайте прямого контакту наконечника флакона з пальцями, очима або контактними лінзами. Після кожного застосування висушіть наконечник і закрийте його захисним ковпачком.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Оптінол® Алерджі сумісний з усіма видами контактних лінз і надає відчуття комфорту при носінні контактних лінз. При використанні медичного виробу виймати контактні лінзи з очей не треба. Крапельниця очних крапель Оптінол® Алерджі має фільтр, який захищає від забруднення вміст контейнера після його першого відкриття протягом 3 місяців.

Не застосовуйте ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ:

- У разі підвищеної чутливості [алергії] до Ектоїну або до будь-якого іншого інгредієнта ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ.

У разі алергічної реакції негайно припиніть застосування виробу.

- У разі якщо флакон має пошкодження або проколи.
- Якщо пройшло більше 3 місяців з моменту відкриття.
- Для безпечного застосування та гігієни кожен флакон повинен застосовуватися лише однією людиною.
- Дані щодо взаємодії між ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ та іншими очними краплями або очними мазями відсутні. Перш ніж застосовувати інший виріб медичного призначення або інший препарат для очей, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо Ви вже застосовуєте ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ.
- ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ, очні краплі, слід зберігати в недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.

БЕЗПЕКА МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Технологія аплікатора містить фільтр, який робить препарат безпечним для застосування, оскільки запобігає забрудненню розчину після відкриття.

Препарат не містить консервантів, що зменшує ймовірність подразнення та ураження поверхні ока. Як правило, медичний виріб добре переноситься. На сьогоднішній день не відомі стійкі побічні ефекти або ті, що виникають регулярно. У поодиноких випадках може виникати короточасне подразнення, почервоніння очей або кон'юнктивіт. Якщо Ви помітите будь-які побічні ефекти, пов'язані із застосуванням ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ, зверніться до свого лікаря.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Наразі дані щодо застосування ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ у період вагітності та годування груддю відсутні. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж застосовувати ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ, якщо Ви вагітні або годуєте груддю.

ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ можна застосовувати у дітей з народження.

Дітям, а також пацієнтам які не можуть самостійно застосовувати ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ, слід допомагати під час застосування.

ОПТИНОЛ® АЛЕРДЖИ можна застосовувати після хірургічного втручання на очах і травм після консультації з лікарем.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати медичний виріб при температурі від 2 °C до 25 °C.

Не застосовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці та флаконі.

УПАКОВКА

По 10 ml (мл) у флаконі – крапельниці. По 1 флакону в картонній коробці.

ВИРОБНИК

«бітоп АГ» Стокумер стр., 28, 58453 Віттен, Німеччина
«bitop AG» Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Germany

Approved for printing
Kukhar Tatiana
23.04.2021

Уповноважений представник виробника в Україні:
Представництво «Ядран-Галенська Лабораторія д.д.»
01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16, Тел. +38 [044] 377-54-16
www.optinol.com.ua

ДАТА ОСТАНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ: 04.2021

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ ОЧНІ КРАПЛІ З ЛІНІЙКИ ОПТИНОЛ®:

МЕДИЧНИЙ ВИРІБ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СКЛАД	ЗАСТОСУВАННЯ	СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	ДІЯ ВИРОБУ	ЗАСТОСУВАННЯ З КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ
ОПТИНОЛ - 0,21%	ДЛЯ ЕКСПРЕС ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ	Палуронат натрію 0,21%	При дискомфорті, сухості, почервонінні, а також під час носіння контактних лінз. При тривалому перебуванні перед екраном комп'ютера і таке інше.	По 1-2 краплі в кожне око тричі на добу.	Зволожує та усуває симптоми подразнення.	Не вимагає зняття контактних лінз.
ОПТИНОЛ - 0,4%	ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ	Палуронат натрію 0,4%	Під час сильної сухості та почервоніння. При надмірних навантаженнях на очі.		Усуває відчуття печіння і подразнення в очах. Забезпечує тривалий захист від подальшого подразнення.	Рекомендується зняти контактні лінзи на 15 хвилин під час закапування.
ОПТИНОЛ ІНТЕНСИВ	ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЇ ОЧЕЙ	Палуронат натрію 0,15%; Декспантенол 2%	При подразненнях поверхні ока, спричинених використанням лінз, оперативним або діагностичним втручанням чи ліками.	По 1-2 краплі декілька разів на день або по мірі необхідності.	Заспокоює, захищає і відновлює поверхню ока.	Не вимагає зняття контактних лінз.

Опис символів застосованих на упаковці:

Виробник

Термін придатності

Номер серії

STERILE A Стерильно, асептична техніка обробки

Зберігати при температурі від 2 °C до 25 °C

Знак CE із номером уповноваженого органу

Прочитайте інструкцію для застосування

Не застосовуйте препарат, якщо він має пошкодження або проколи



UA.TR.116



jgl

UA 130003463/01

KUTIJA	UPUTA	ETIKETA	TUBA	BOJE:
OPTINOL ALLERGY K OKO 10 ML_UA				Crna Pantone 323
jgl Kao kap vode na dlanu	ŠIFRA VERZIJA 01	DATUM 26.01.2021.	130003463 01	Ne printa se Štanca
	DIMENZIJA 150 x 300 mm	FARMACODE 906, 907	NE FALCANA	
	ORIJENTACIJA NAČIN SAVIJANJA	FONT / VELIČINA Conduit ITC Light/7 pt	SpecPacGen000978	
	BROJ SPECIFIKACIJE PRIPREMA	Adobe Illustrator CC	Marijana	
	IZRADIO			

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. ispravka
Date: 26.01.2021. | <input checked="" type="checkbox"/> 7. ispravka
Date: 22.04.2021. |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. ispravka
Date: 18.02.2021. | <input type="checkbox"/> 8. ispravka
Date: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. ispravka
Date: 15.03.2021. | <input type="checkbox"/> 9. ispravka
Date: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4. ispravka
Date: 06.04.2021. | <input type="checkbox"/> 10. ispravka
Date: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5. ispravka
Date: 06.04.2021. | <input type="checkbox"/> 11. ispravka
Date: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6. ispravka
Date: 22.04.2021. | <input type="checkbox"/> 12. ispravka
Date: |



906



907